



PROFESSIEONEEL
**OORBELLEN
PRIKKEN**

IN 12 STAPPEN

Oorbellen prikken met het System75 is eenvoudig, veilig en absoluut hygiënisch. Deze handleiding leidt je stap voor stap door het volledige proces om ervoor te zorgen dat je oorbellen kunt zetten met vertrouwen en precisie.

STAP 1: DESINFECTEREN

Desinfecteer de voor- en achterkant van het oor grondig.

Wacht minstens 30 seconden zodat de alcohol volledig kan drogen. Het is van cruciaal belang om het oor goed te desinfecteren om eventuele bacteriën te doden die een infectie kunnen veroorzaken.

Gebruik een schoon alcoholdoekje om zowel de voor- als achterkant van het oor goed schoon te maken. Zorg ervoor dat je het doekje op alle delen van het oor gebruikt waar de piercing zal worden geplaatst.

Laat de alcohol volledig drogen voordat je verdergaat om een glad en schoon oppervlak te garanderen.



STAP 2: MARKEREN

Zet een puntje op het oor met de stift. Dit dient als markering voor waar de oorbel zal worden geplaatst.

Het markeren van de exacte locatie van de oorbel is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de oorbel precies op de gewenste plek komt.

Gebruik een steriele stift om een klein stipje te zetten op de oorlel.

Deze markering helpt bij het nauwkeurig plaatsen van de oorbel en zorgt ervoor dat beide oren symmetrisch worden geprikt.



STAP 3: CONTROLEER DE MARKERING

Laat de klant de positie van het puntje controleren en goedkeuren voordat je verdergaat. Wrijf met een alcoholdoekje zachtjes de overtollige inkt weg, zodat er slechts een klein puntje zichtbaar blijft.

Het is essentieel om de klant bij dit proces te betrekken en ervoor te zorgen dat ze tevreden zijn met de geplande positie van de piercing. Geef de klant een spiegel en laat hen de markering bekijken.

Dit biedt een laatste kans om eventuele aanpassingen te maken voordat de oorbel wordt geschoten. Het verwijderen van overtollige inkt helpt om een duidelijke en nauwkeurige markering over te houden.



STAP 4: VOORBEREIDEN VAN DE CARTRIDGE

Verwijder het papiertje dat de cartridge afsluit, maar haal de cartridge niet uit de verpakking. Het behoud van de steriliteit van de cartridge is van het grootste belang.

Verwijder voorzichtig het papier zonder de cartridge zelf aan te raken om te voorkomen dat deze wordt besmet.

Door de cartridge in de verpakking te laten totdat deze in het instrument wordt geplaatst, zorg je ervoor dat deze schoon en steriel blijft.



STAP 5: PLAATSEN VAN DE CARTRIDGE

Houd de verpakking met de opening naar beneden en plaats de cartridge in het instrument. Zorg ervoor dat het achterste gedeelte van de cartridge eerst in het instrument klikt.

Door de cartridge correct te plaatsen, verzeker je een soepel schietproces. Het achterste gedeelte moet eerst worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de oorbel goed wordt uitgelijnd met het instrument.

Dit zorgt voor nauwkeurige plaatsing en voorkomt dat de oorbel scheef wordt gezet.



STAP 6: BEVESTIGEN VAN DE CARTRIDGE

Klik nu ook het voorste gedeelte van de cartridge in het instrument. De cartridge moet nu perfect horizontaal op het instrument staan. Bewaar de verpakking, want deze heb je later nog nodig.

Zorg ervoor dat de cartridge stevig en volledig is geplaatst om fouten te voorkomen. Het horizontaal plaatsen van de cartridge zorgt voor stabiliteit en precisie tijdens het schieten.

Bewaar de verpakking omdat deze later zal helpen bij het veilig verwijderen van de cartridge zonder direct contact.



STAP 7: POSITIONEREN VAN DE STEKER

Positioneer de steker op het gemarkeerde puntje op het oor en druk zachtjes naar voren om de oorbel perfect te positioneren. Het correct positioneren van de steker op het gemarkeerde punt is cruciaal voor een nauwkeurige plaatsing.

Gebruik de markering als leidraad en controleer of de oorbel precies op de juiste plek staat. Door voorzichtig naar voren te drukken, kun je de positie van de oorbel jn afstemmen voor een perfecte plaatsing.



STAP 8: INZETTEN VAN DE OORBEL

Druk het instrument helemaal in totdat je niet meer verder kunt drukken. Doe dit in een vloeiende, continue beweging voor de beste resultaten. Een vloeiende beweging zorgt ervoor dat de oorbel snel en pijnloos wordt geschoten.

Druk het instrument volledig in één keer door om te voorkomen dat de oorbel halverwege blijft steken. Een consistente druk zorgt voor een schone en precieze piercing.



STAP 9: LOSLATEN VAN HET INSTRUMENT

Laat de druk op het instrument los en beweeg het instrument voorzichtig naar beneden om de oorbel op zijn plaats te laten vallen. Het loslaten van de druk moet net zo gecontroleerd gebeuren als het schieten van de oorbel.

Beweeg het instrument voorzichtig weg van het oor om de oorbel veilig en correct op zijn plaats te laten vallen. Dit minimaliseert ongemak en zorgt voor een nette piercing.



STAP 10: HERGEBRUIK VAN DE VERPAKKING

Plaats de verpakking opnieuw op de cartridge. Dit zorgt ervoor dat de cartridge veilig verwijderd kan worden zonder direct contact.

Het terugplaatsen van de verpakking over de cartridge helpt bij het veilig verwijderen ervan. Dit voorkomt dat je de cartridge direct aanraakt, waardoor de kans op besmetting of verwonding wordt geminimaliseerd.



STAP 11: VERWIJDEREN VAN DE CARTRIDGE

Door zachtjes druk uit te oefenen op de achterkant, kun je de cartridge gemakkelijk uit het instrument verwijderen.

Door voorzichtig te werk te gaan bij het verwijderen van de cartridge, vermijd je dat er kracht wordt uitgeoefend die het instrument of de cartridge zou kunnen beschadigen.

Deze stap zorgt ervoor dat het instrument klaar is voor de volgende klant of dat het veilig kan worden opgeborgen.



STAP 12: NAZORG INSTRUCTIES

Informeer de klant over de nazorg. Leg uit dat het nazorgproduct na de eerste 24 uur twee keer per dag op de voor- en achterkant van het oorgaatje moet worden aangebracht.

Dit helpt bij het voorkomen van infecties en bevordert een snelle genezing. Goede nazorg is essentieel voor een snelle en probleemloze genezing.

Leg aan de klant uit hoe ze het nazorgproduct correct moeten aanbrengen en benadruk het belang van hygiëne en regelmatige verzorging van het oorgaatje. Dit zal helpen om infecties te voorkomen en zorgt ervoor dat de nieuwe piercing gezond blijft.



PROFESSIEONEEL OORBELLEN PRIKKEN

IN 12 STAPPEN

PiercingsWorks

www.piercingsworks.com

www.piercingzetten.com

www.aphraheals.com

www.piercingcursus.com

Reguliersbreestraat 46, 1017 CN

Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 (0) 20 428 20 49

Whatsapp: +31 (0)6 53 555 143

onix@piercingsworks.com